



**PRX-T<sup>®</sup>**<sub>33</sub>  
**wiQO**

**LA BIORIVITALIZZAZIONE  
SENZA AGHI**

**PROTOCOLLI DI ASSOCIAZIONE**

**wiQO<sup>®</sup>**

**FORMULATORS OF SKIN CONFIDENCE**

Materiali informativi riservati alla classe medica. PRX-T33 è un dispositivo medico di Classe I.



**PRX-T<sup>®</sup><sub>33</sub>**  
wiqo  
LA BIORIVITALIZZAZIONE  
SENZA AGHI

## INDEX

- / Kit trattamento PRX-T<sub>33</sub> \_02
- / Metodica corretta di applicazione PRX-T<sub>33</sub> \_04
- / Protocolli di associazione:
  - / Filler profondi, medi e superficiali \_8
  - / Carbossiterapia \_10
  - / Idrodermoabrasione \_12
  - / Radiofrequenza frazionata non ablativa \_13
  - / Microneedling \_14
  - / Biorivitalizzazione iniettiva \_16
  - / Fili in PDO \_18
  - / Radiofrequenza ablativa \_20
  - / Laser frazionale non ablativo \_21
- / Protocolli speciali:
  - / Smagliature \_22
  - / Cellulite \_24
  - / Alopecia \_26

# KIT TRATTAMENTO PRX-T<sub>33</sub>

La biorivitalizzazione senza aghi in pochi semplici passaggi, completamente indolore.



## PREPARARE

### P solution

Pretrattamento a base di acidi calibrati.



## STIMOLARE

### PRX-T<sub>33</sub>

Biorivitalizzante non iniettivo.



## IDRATARE

### Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelli Secche

Post-trattamento per viso collo e décolleté.




## IDRATARE

### Crema Corpo Rassodante WiQo

Post-trattamento per il corpo.



# METODICA CORRETTA DI APPLICAZIONE DI PRX-T<sub>33</sub>

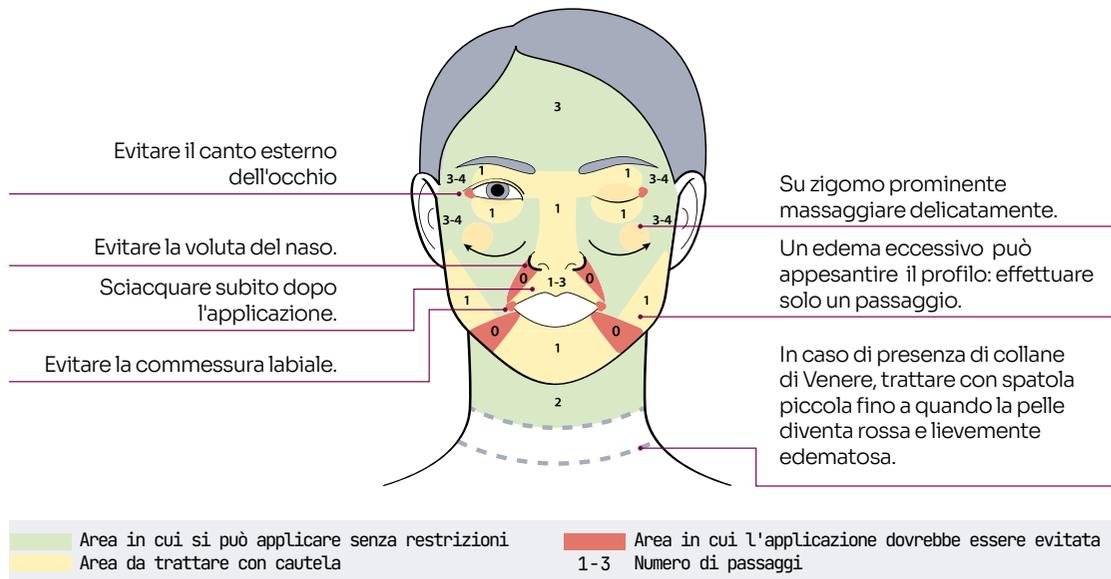

1. Per evitare reazioni allergiche, utilizzare **guanti in nitrile**, non in lattice. Coprire la punta della spatola WiQo con un guanto di nitrile
2. Iniziare l'applicazione su un'area limitata.
3. Massaggiare sempre il prodotto su pelle ben lubrificata per evitare escoriazioni (se il guanto o la spatola non scivolano più, applicare altro prodotto).
4. Un leggero formicolio è normale. Se il paziente avverte un bruciore intenso, significa che la pelle è irritabile. In questo caso sciacquare la zona con acqua, interrompere la seduta e applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelle Secca**.
5. In caso di applicazione su pelle acneica, in particolare sulle zone delicate del viso (es. lati della bocca), effettuare un massimo di due applicazioni di **PRX-T<sub>33</sub>**, massaggiando delicatamente. Un massaggio eccessivamente aggressivo può abradere la pelle danneggiata e causare forti irritazioni.
6. Evitare la zona sotto gli occhi (dove si formano le borse) per evitare antiestetici gonfiore nei giorni successivi all'applicazione, oppure applicare un solo strato con una leggera pressione.
7. Prestare attenzione durante l'applicazione sul solco intra-mammario.
8. Raccomandare al paziente di usare una protezione solare adeguata dopo il trattamento.



## AVVERTENZE\*

- / Uso esterno, uso topico.
- / Evitare il contatto con gli occhi e in caso di contatto sciacquare con soluzione fisiologica.
- / Se il paziente assume acido retinoico topico (isotretinonina), sospendere l'uso 15 giorni prima di eseguire l'applicazione con **PRX-T<sub>33</sub>**.
- / Non applicare sugli angoli della bocca se interessati da cheilite angolare.
- / Evitare l'applicazione su nevi di qualsiasi tipo istologico e/o su cute con ustioni di vario grado, eritema solare ecc.
- / Trattare a una ragionevole distanza dall'ultima rasatura o ceretta.
- / Conservare **PRX-T<sub>33</sub>** a 2°C/8°C anche dopo l'apertura della fiala.

\*Si raccomanda di seguire le indicazioni come da foglietto illustrativo.



## CONTROINDICAZIONI GENERALI

- / Pelle irritata e/o irritabile
- / Dermatite seborroica o atopica
- / Pelle macerata, ferite aperte, eruzioni cutanee e/o erpetiche
- / Patologie tumorali dell'epidermide e del derma o altre patologie
- / neoplastiche con possibile coinvolgimento locale (ad es. linfoma cutaneo).
- / Allergia ai componenti del prodotto
- / Gravidanza e allattamento



## POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

- / Esfoliazione (anche intensa)
- / Arrossamento (immediato o ritardato)
- / Bruciore durante l'applicazione (anche intenso e immediato)
- / Secchezza
- / Anafilassi
- / Prurito
- / Infiammazione persistente
- / Comparsa di chiazze rotonde e più scure nei due giorni successivi all'applicazione: si tratta di aree di pelle più spessa che si seccano e scompariranno attraverso l'esfoliazione naturale in pochi giorni.



## UTILE DA SAPERE

In caso di effetti collaterali che causano infiammazione persistente (eritema che dura più di un giorno) è importante tenere a mente che esiste il rischio di iper-pigmentazione in soggetti predisposti. Ciò non è dovuto direttamente all'acido tricloroacetico, ma piuttosto all'eritema. Raccomandiamo di monitorare tali pazienti per assicurarsi che evitino l'esposizione al sole e utilizzino creme solari ad alta protezione. Se necessario trattare l'infiammazione.



## **PRX-T<sub>33</sub>** + FILLER MEDI E PROFONDI

### INDICAZIONE D'USO

Trattamento combinato che mira al miglioramento della perdita di volume del viso, a conferire maggiore volume e a ridurre la profondità di rughe.

### VANTAGGI

I filler profondi (es. zigomatici) restituiscono volume ai compartimenti del viso che lo hanno perso con l'invecchiamento, agendo su un piano profondo.

**PRX-T<sub>33</sub>** contribuisce a sollevare la pelle grazie all'edema che induce, e ne migliora la tonicità e levigatezza. Inoltre, la tecnica di applicazione del

**PRX-T<sub>33</sub>**, che avviene attraverso un massaggio, aiuta a diffondere il filler in modo omogeneo nel piano di iniezione.

### METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con **P solution WiQo** e asciugare bene.
2. Dopo aver disinfettato procedere con l'iniezione del filler secondo le istruzioni del produttore.
3. Perforare il tappo della fiala **PRX-T<sub>33</sub>** con la punta della cannula o un ago da 18G.
4. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
5. Massaggiare il prodotto sulla pelle con tecnica specifica fino a completo assorbimento. **Durante l'applicazione, fare attenzione a massaggiare nella direzione corretta in base a come è posizionato il filler per evitare spostamenti.**
6. Rimuovere i residui di prodotto con un panno umido.
7. Applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelli Secche.**

### PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Effettuare il numero di sedute di **PRX-T<sub>33</sub>** prefissato, a distanza di una settimana.

## **PRX-T<sub>33</sub>** + FILLER SUPERFICIALI

### INDICAZIONE D'USO

Trattamento combinato mirato a ridurre la profondità di rughe sottili e superficiali.

### VANTAGGI

Nel trattamento delle rughe superficiali **PRX-T<sub>33</sub>** può essere utilizzato prima dell'impianto di filler: applicato prima, **PRX-T<sub>33</sub>** induce un leggero edema che solleva l'epidermide che stacca le rughe sottili dal piano profondo e migliora l'inserimento e la distribuzione del filler superficiale.

### METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con **P solution WiQo** e asciugare bene.
2. Perforare il tappo della fiala di **PRX-T<sub>33</sub>** con la punta della cannula o con un ago da 18G.
3. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
4. Applicare **PRX-T<sub>33</sub>** come da procedura.
5. Iniettare il filler secondo le istruzioni del produttore.
6. Rimuovere i residui di prodotto con un panno umido.
7. Applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelli Secche.**

### PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Effettuare il numero di sedute di **PRX-T<sub>33</sub>** prefissato, a distanza di una settimana.

## PRX-T<sub>33</sub> + CARBOSSITERAPIA

### INDICAZIONE D'USO

Trattamento combinato mirato all'invecchiamento perioculare, alla riduzione di occhiaie, borse e rughe mimiche, al miglioramento della densità e dell'elasticità della pelle, a contrastare la lassità cutanea di braccia e gambe. Inoltre, aiuta a ridurre i depositi di grasso/cellulite.

### VANTAGGI

Il doppio meccanismo d'azione della carbossiterapia (chimico sul microcircolo e meccanico di distacco) si combina particolarmente bene con l'azione del PRX-T<sub>33</sub>. Questo protocollo può essere utilizzato anche in estate.

### METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con P solution WiQo e asciugare bene.
2. Perforare il tappo della fiala di PRX-T<sub>33</sub> con la punta della cannula o un ago 18G.
3. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
4. Massaggiare il prodotto sulla pelle con tecnica specifica fino a completo assorbimento. Quando si trattano piccole aree, applicare utilizzando la spatola WiQo ricoperta da un guanto in nitrile.
5. Insufflare la CO2 secondo le istruzioni del produttore.
6. Fare 1 o 2 ulteriori passaggi di PRX-T<sub>33</sub>. Ciò contribuisce a diffondere l'anidride carbonica.
7. Rimuovere i residui di prodotto con un panno umido.
8. Applicare la Crema Nutriente e Idratante WiQo per pelli secche se si tratta il viso o la Crema Corpo Rassodante WiQo, se si trattano braccia o gambe.

### PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Viso e contorno occhi: 3-5 sedute a 15 giorni di distanza.

Corpo: 5-10 sedute a cadenza settimanale.

## RISULTATI PRIMA / DOPO

♀ 50 A



Prima



Dopo 3 sedute a cadenza settimanale

## PRX-T<sub>33</sub> + IDRODERMOABRASIONE

### INDICAZIONE D'USO

Trattamento combinato mirato al miglioramento di pelle spenta, con macchie e foto-danneggiata, dal tono irregolare, secca e disidratata e di pelle a tendenza acneica o con cicatrici lievi da acne.

### VANTAGGI

**PRX-T<sub>33</sub>** rende lo strato corneo più sottile, di conseguenza, i punti neri diventano più superficiali e più facili da rimuovere. **PRX-T<sub>33</sub>** porta a idratazione profonda e istantanea che rimpolpa la pelle e produce un leggerissimo effetto peeling che la schiarisce e la illumina.

### METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con **P solution WiQo** e asciugare bene.
2. Perforare il tappo della fiala di **PRX-T<sub>33</sub>** con la punta della cannula o un ago 18G.
3. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
4. Massaggiare, con tecnica specifica, il prodotto sulla pelle fino a completo assorbimento. Quando si trattano piccole aree, applicare utilizzando la **spatola WiQo** ricoperta da un guanto in nitrile.
5. Rimuovere i residui di prodotto con un panno umido.
6. Eseguire la seduta di Idrodermoabrasione secondo le istruzioni del produttore. Evitare i peeling acidi in questa fase.
7. Fare 2 ulteriori passaggi di **PRX-T<sub>33</sub>**.
8. Rimuovere i residui di prodotto con un panno umido.
9. Applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelli Secche** pochi minuti dopo.

### PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Effettuare il numero di sedute prefissato, a distanza di una settimana.

## PRX-T<sub>33</sub> + RADIOFREQUENZA FRAZIONATA NON ABLATIVA

### INDICAZIONE D'USO

Trattamento combinato (mirato) a migliorare la lassità cutanea di viso e corpo.

### VANTAGGI

La doppia stimolazione, chimica (**PRX-T<sub>33</sub>**) e fisica (**RF**), agisce su diversi livelli sia della pelle che del derma, creando una sinergia che amplifica la risposta terapeutica e i risultati estetici finali.

### METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con **P solution WiQo** e asciugare bene.
2. Eseguire il trattamento di radiofrequenza non ablativa.
3. Perforare il tappo della fiala di **PRX-T<sub>33</sub>** con la punta della cannula o con un ago da 18G.
4. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
5. Massaggiare il prodotto sulla pelle con tecnica specifica fino a completo assorbimento. Quando si trattano piccole aree, applicare utilizzando la spatola WiQo ricoperta da un guanto in nitrile.
6. Ripetere l'applicazione di **PRX-T<sub>33</sub>** altre 2-3 volte, con la stessa tecnica.
7. Rimuovere i residui di prodotto con un panno umido.
8. Applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelli Secche** se si tratta il viso o la **Crema Corpo Rassodante WiQo** se si tratta il corpo.

### PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Pianificare almeno sei sessioni settimanali consecutive (o più in base alle condizioni iniziali).

## RISULTATI PRIMA / DOPO

Cortesia di Dr. F.P. Alberico



Prima



Dopo un ciclo completo

## PRX-T<sub>33</sub> + MICRONEEDLING

### INDICAZIONE D'USO

Trattamento combinato (mirato) a migliorare cicatrici depresse (acne, varicella ecc.), atrofia cutanea postinfiammatoria, rughe indelebili e pori dilatati.

### VANTAGGI

L'effetto sinergico della stimolazione chimica (PRX-T<sub>33</sub>) e meccanica (**microneedling**) massimizza i risultati estetici e la soddisfazione del paziente.

### METODO DI APPLICAZIONE

Facoltativo: applicare una crema anestetica sulla zona da trattare prima di procedere.

1. Detergere la pelle con **P solution WiQo** e asciugare bene.
2. Perforare il tappo della fiala di **PRX-T<sub>33</sub>** con la punta della cannula o un ago 18G.
3. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
4. Massaggiare il prodotto sulla pelle con tecnica specifica fino a completo assorbimento. Quando si trattano piccole aree, applicare utilizzando la **spatola WiQo** ricoperta da un guanto in nitrile.
5. Ripetere l'applicazione di **PRX-T<sub>33</sub>** per 2-3 volte fino a quando le aree depresse delle cicatrici, se presenti, si sollevano.
6. Eseguire il microneedling secondo le istruzioni del produttore.
7. Immediatamente dopo la procedura, fare 1 o 2 ulteriori passaggi di **PRX-T<sub>33</sub>**.
8. Sciacquare la zona con acqua.
9. Applicare una garza bagnata sulla pelle e posizionare sopra un impacco di ghiaccio.
10. Non applicare altri prodotti nelle 24 ore successive (creme, trucchi, ecc.).

### PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Da 3 a 6 sedute in base alle esigenze e alle aspettative del paziente.

## RISULTATI PRIMA / DOPO



Prima



Dopo 6 sedute



Prima



Dopo un ciclo completo


## PRX-T<sub>33</sub> + BIORIVITALIZZAZIONE INIETTIVA

### INDICAZIONE D'USO

Trattamento combinato che mira al miglioramento di pelle secca e disidratata, pelle foto-danneggiata, lassità cutanea e che promuove la densità cutanea e l'elasticità del viso.

### VANTAGGI

L'effetto sinergico di **eso ed endo-biorivitalizzazione** comporta una doppia stimolazione dermica, con risultati decisamente migliori rispetto ai due trattamenti eseguiti separatamente (vedi tabella).

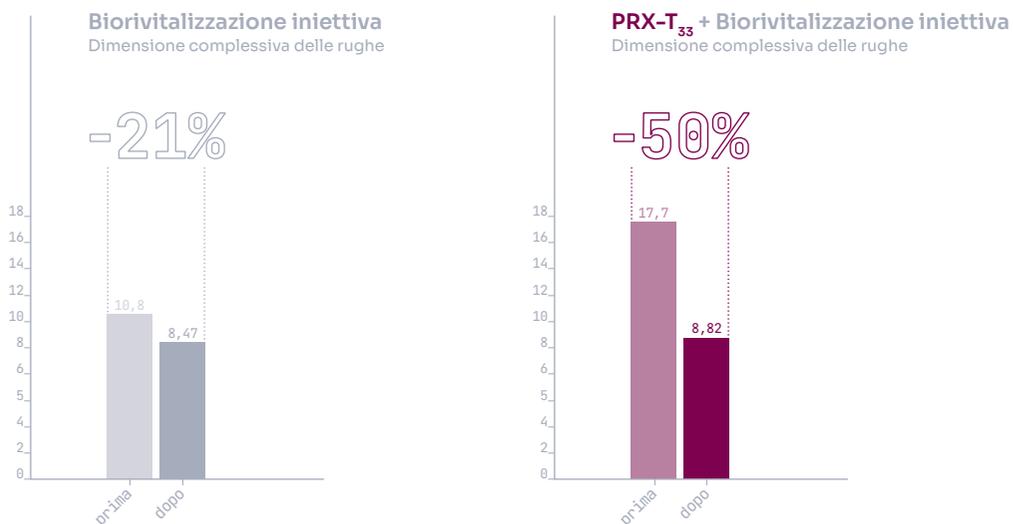

L'associazione dei due trattamenti di biorivitalizzazione porta ad un **miglioramento del 50,2% rispetto al 21,6%** ottenuto con la sola biorivitalizzazione iniettiva.

Valutazione strumentale effettuata con fotocamera multi-spettrale 3D.

L'edema prodotto da **PRX-T<sub>33</sub>** attenua il dolore delle successive iniezioni e riduce la formazione di ecchimosi.

**PRX-T<sub>33</sub>** porta a un'idratazione profonda e immediata che rassoda la pelle. Inoltre, accelera il turn over cutaneo che si traduce in una pelle luminosa e radiosa.

Il paziente è immediatamente soddisfatto, ancor prima dell'effetto della stimolazione dei fibroblasti, visibile a 20 giorni circa dal trattamento.

### METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con **P solution WiQo** e asciugare bene.
2. Perforare il tappo della fiala di **PRX-T<sub>33</sub>** con la punta della cannula o un ago 18G.
3. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
4. Massaggiare il prodotto sulla pelle con tecnica specifica fino a completo assorbimento. Quando si trattano piccole aree, applicare utilizzando la spatola WiQo ricoperta da un guanto in nitrile.
5. Ripetere l'applicazione 2-3 volte (ESO-BIORIVITALIZZAZIONE).
6. Iniettare il pool biorivitalizzante, con tecnica specifica, attraverso piccoli pomfi intradermici. (ENDO-BIORIVITALIZZAZIONE).
7. Rimuovere i residui di prodotto con un panno umido.
8. Applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelli Secche**.

### PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

I trattamenti di biorivitalizzazione vengono eseguiti in 3 sedute, ciascuna a distanza di 20 giorni: programmare anche un trattamento con **PRX-T<sub>33</sub>** tra due sedute di trattamento combinato.

- |   |   |
|---|---|
| 1. PRX-T <sub>33</sub> + pool biorivitalizzante | 4. PRX-T <sub>33</sub>                          |
| 2. PRX-T <sub>33</sub>                          | 5. PRX-T <sub>33</sub> + pool biorivitalizzante |
| 3. PRX-T <sub>33</sub> + pool biorivitalizzante |   |

## RISULTATI PRIMA / DOPO



Prima



Dopo un ciclo completo  
Trattamento combinato eseguito su metà  
volto (parte destra).

## PRX-T<sub>33</sub> + FILI DI STIMOLAZIONE IN PDO

### INDICAZIONE D'USO

Trattamento combinato che mira a migliorare le rughe intorno agli occhi quali zampe di gallina e mimiche, rughe sottili sulla fronte, a contrastare la perdita di definizione della linea mandibolare, le collane di venere e la lassità cutanea dell'intero braccia.

### VANTAGGI

**PRX-T<sub>33</sub>** provoca un edema cutaneo temporaneo che porta a un piano di clivaggio meno vascolarizzato, facilitando l'impianto dei fili in PDO, riducendo il dolore e il rischio di ecchimosi.

**PRX-T<sub>33</sub>** inoltre porta a idratazione profonda e istantanea che rimpolpa la pelle e accelera il turn over cutaneo che la schiarisce e la illumina. Pertanto, mentre l'effetto del threading è visibile dopo un periodo di tempo, **PRX-T<sub>33</sub>** ha un risultato visibile fin dall'inizio portando alla soddisfazione immediata del cliente.

Questo trattamento associato stimola la produzione di collagene sia di tipo I che di tipo III, portando a un effetto più naturale rispetto alla sola applicazione di fili e comporta anche un minor numero di fili richiesti nelle sessioni successive.


### METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con **P solution WiQo** e asciugare bene.
2. Forare il tappo della fiala di **PRX-T<sub>33</sub>** con la punta della cannula o con un ago da 18G.
3. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
4. Massaggiare il prodotto sulla pelle con tecnica specifica fino a completo assorbimento. Quando si trattano piccole aree, applicare utilizzando la **spatola WiQo** ricoperta da un guanto in nitrile.
5. Fare 1 o 2 ulteriori passaggi di **PRX-T<sub>33</sub>** nel senso della lunghezza, lungo la depressione delle rughe lineari (es. linee del collo) con la spatola WiQo fino a quando la pelle non si solleva leggermente.
6. Impiantare i fili in PDO.
7. Rimuovere i residui di prodotto con un panno umido.
8. Applicare una garza bagnata sulla pelle e posizionare sopra un impacco di ghiaccio.


### PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

1 seduta di **PRX-T<sub>33</sub>** con Fili in PDO e 2/3 sedute di **PRX-T<sub>33</sub>** da solo, a distanza di una settimana l'una dall'altra, da proseguire secondo le esigenze e le aspettative del paziente.

## RISULTATI PRIMA / DOPO

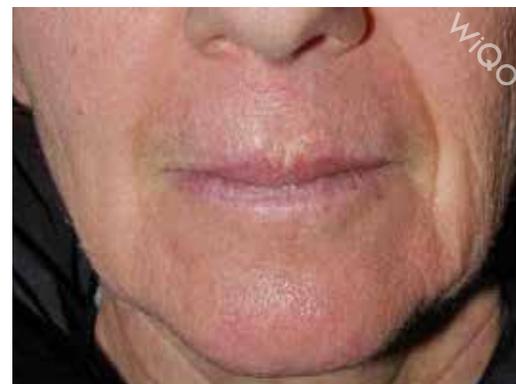

Prima

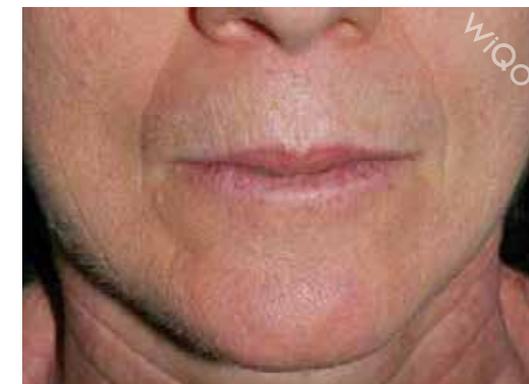

Dopo un ciclo completo



Prima



Dopo 1 trattamento combinato e 4 sedute di **PRX-T<sub>33</sub>**

## PRX-T<sub>33</sub> + RADIOFREQUENZA ABLATIVA

### INDICAZIONE D'USO

Trattamento combinato mirato a migliorare inestetismi quali rughe, cicatrici, pori visibili, smagliature, grana della pelle irregolare e pigmentazione.

### VANTAGGI

La doppia stimolazione, chimica (PRX-T<sub>33</sub>) e fisica (RF), agisce su diversi livelli sia della pelle che del derma, creando una sinergia che amplifica la risposta terapeutica e i risultati estetici finali.

### PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Eeguire un trattamento PRX-T<sub>33</sub> una settimana prima del trattamento di radiofrequenza ablativa e un'altra sessione PRX-T<sub>33</sub>, 3 settimane dopo la sessione RF ablativa.

## RISULTATI PRIMA / DOPO



Prima

Dopo un ciclo completo

Cortesia di Dr. F.P. Alberico

## PRX-T<sub>33</sub> + LASER FRAZIONALE NON ABLATIVO

### INDICAZIONE D'USO

Trattamento combinato mirato a correggere inestetismi quali macchie senili, cicatrici, pelle danneggiata dal sole, rughe.

### VANTAGGI

La stimolazione chimica (PRX-T<sub>33</sub>) e quella fisica (laser) agiscono sulla matrice dermica in modi diversi. L'esecuzione di un'applicazione settimanale di PRX-T<sub>33</sub> tra una sessione laser e l'altra consente un profondo effetto sinergico massimizzando i risultati estetici.

### PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Applicazione settimanale di PRX-T<sub>33</sub> nell'intervallo tra due sessioni successive di laser; con inizio una settimana dopo la prima sessione di laser e termine una settimana prima della seconda sessione di laser.

## RISULTATI PRIMA / DOPO



Prima

Dopo un ciclo completo

Cortesia di Dr. F.P. Alberico

## PRX-T<sub>33</sub> PER IL TRATTAMENTO DELLE SMAGLIATURE

### INDICAZIONE D'USO

Trattamento mirato a correggere e migliorare l'inestetismo delle smagliature recenti (deprese o vuote alla palpazione) e di quelle bianche e perlacee (in associazione ad altre procedure micro-invasive).

### VANTAGGI

PRX-T<sub>33</sub> favorisce la rigenerazione cutanea e rende la pelle più liscia, compatta e luminosa senza utilizzo di aghi né bisturi.

### METODO DI APPLICAZIONE PER SMAGLIATURE RECENTI, DEPRESSE O VUOTE ALLA PALPAZIONE

1. Detergere la pelle con **P solution WiQo** e asciugare bene.
2. Perforare il tappo della fiala di **PRX-T<sub>33</sub>** con la punta della cannula o con un ago 18G.
3. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
4. Applicare il prodotto lungo la lesione della smagliatura utilizzando la **spatola WiQo** ricoperta da un guanto in nitrile, fino a completo assorbimento.
5. Fare 1 o 2 ulteriori passaggi di **PRX-T<sub>33</sub>** sulla smagliatura come se si volesse cancellarla, finché il fondo non si rileva.
6. Rimuovere i residui di prodotto con un panno umido.
7. Applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelli Secche** e consigliare come programma domiciliare la **Crema Corpo Rassodante WiQo**.

### METODO DI APPLICAZIONE PER SMAGLIATURE BIANCHE E PERLACEE


Questo tipo di smagliature può essere trattato sia con il protocollo associato **PRX-T<sub>33</sub>** e Radiofrequenza Frazionata non Ablativa, sia con il protocollo associato **PRX-T<sub>33</sub>** e microneedling.

### PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

5-10 sedute settimanali di **PRX-T<sub>33</sub>** da solo per il trattamento delle smagliature recenti.


3-5 sedute di **PRX-T<sub>33</sub>**, ciascuna a distanza di una settimana, abbinate ad altre procedure.

## PROTOCOLLI DI ASSOCIAZIONI - TRATTAMENTO DELLE SMAGLIATURE

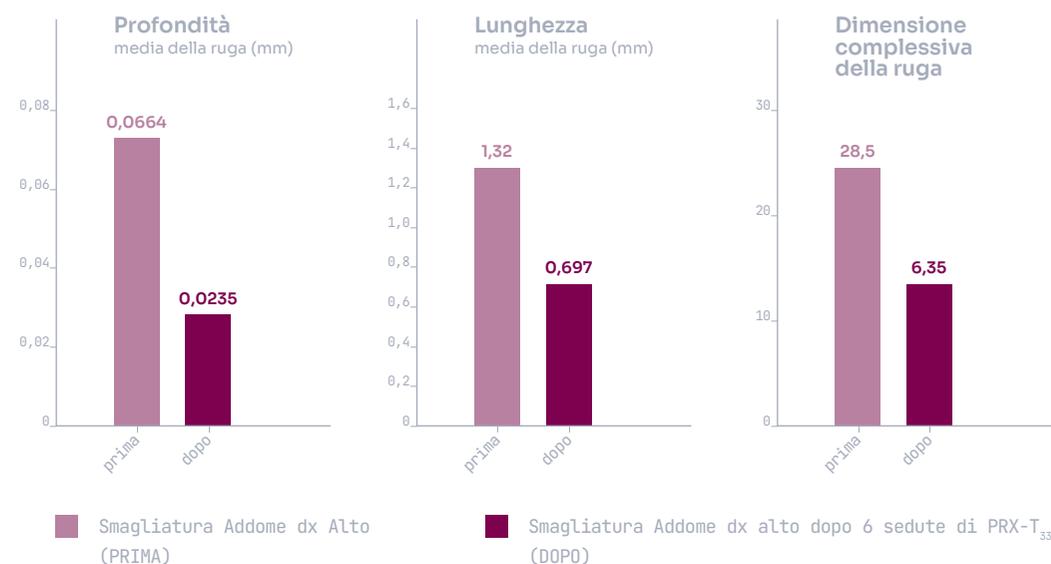


## RISULTATI PRIMA / DOPO

Valutazione strumentale effettuata con fotocamera multi-spettrale 3D.

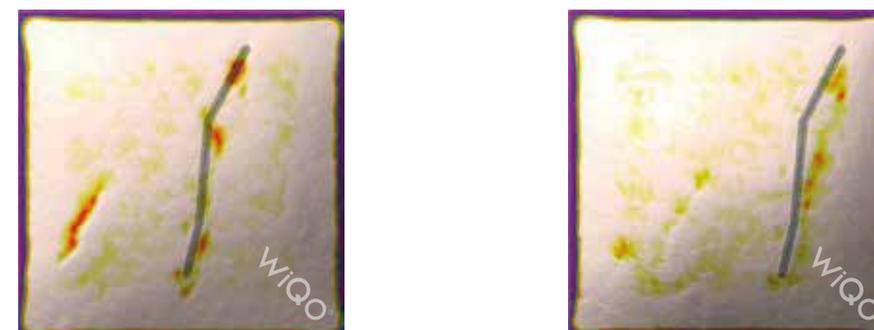

Prima

Dopo 6 sedute di **PRX-T<sub>33</sub>**

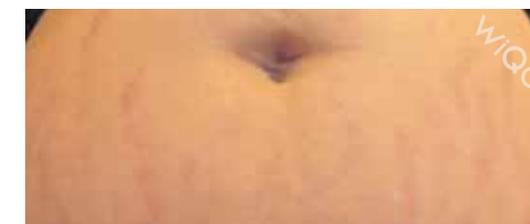

Prima

Dopo 6 sedute di **PRX-T<sub>33</sub>**

## **PRX-T<sub>33</sub>** **PER IL TRATTAMENTO DELLA CELLULITE**

### INDICAZIONE D'USO

Trattamento combinato che mira a rassodare la pelle e migliorarne l'elasticità e la levigatezza quando ci si sottopone a trattamenti anti-cellulite.

### VANTAGGI

La cellulite ha un'eziopatogenesi mista, infiammatoria e vascolare. Il trattamento farmacologico più consolidato prevede l'iniezione in loco di sostanze che favoriscono il drenaggio e il ripristino dei volumi. Queste iniezioni possono avvenire a livello dermico (mesoterapia) o a livello sottocutaneo (agenti antilipodistrofici). L'associazione con PRX-T33 ha il vantaggio di migliorare il turgore cutaneo, aumentandone il turgore, mentre l'utilizzo domiciliare della Crema Corpo Rassodante WiQo completa la stimolazione e attraverso l'automassaggio della zona, contribuisce ulteriormente al processo drenante.

### METODO DI APPLICAZIONE ABBINATO AD AGENTI ANTILIPODISTROFICI

1. Detergere la pelle con P solution WiQo e asciugare bene.
2. Perforare il tappo del flacone PRX-T<sub>33</sub> con la punta della cannula o un ago 18G.
3. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
4. Massaggiare il prodotto sulla pelle con tecnica specifica fino a completo assorbimento.
5. Applicare un secondo strato di PRX-T<sub>33</sub> con la stessa tecnica di massaggio.
6. Iniettare gli agenti antilipodistrofici.
7. Applicare un altro strato di PRX-T<sub>33</sub>.
8. Rimuovere i residui di prodotto con un panno umido.
9. Applicare la Crema Corpo Rassodante WiQo e prescriberla come cura domiciliare.

### METODO DI APPLICAZIONE ABBINATO ALLA MESOTERAPIA

1. Detergere la pelle con P solution WiQo e asciugare bene.
2. Perforare il tappo del flacone PRX-T<sub>33</sub> con la punta della cannula o un ago 18G.
3. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
4. Massaggiare, con tecnica specifica, il prodotto sulla pelle fino a completo assorbimento.
5. Effettuare la seduta di mesoterapia secondo le istruzioni del produttore.
6. Rimuovere l'eccesso di prodotto con un panno umido.
7. Non applicare alcun prodotto subito dopo il trattamento.

### PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

#### CON AGENTI ANTILIPODISTROFICI

Si consigliano sessioni settimanali secondo questo schema:

PRX-T<sub>33</sub> + Gel poliaminoacidico atilipodistrofico

PRX-T<sub>33</sub> + Gel poliaminoacidico atilipodistrofico

PRX-T<sub>33</sub> da solo

PRX-T<sub>33</sub> + Gel poliaminoacidico atilipodistrofico

PRX-T<sub>33</sub> da solo

#### CON LA MESOTERAPIA

Si consigliano 5 sessioni settimanali combinate.

### RISULTATI



Dopo un ciclo completo

Gamba sinistra sottoposta a trattamento con solo gel poliaminoacidico atilipodistrofico

## PRX-T<sub>33</sub> + MESOTERAPIA NEL TRATTAMENTO DELL'ALOPECIA

### INDICAZIONE D'USO

Trattamento combinato che mira a contrastare la perdita dei capelli e a favorirne la ricrescita.

### VANTAGGI

La biostimolazione con PRX-T<sub>33</sub> migliora la biodisponibilità della mesoterapia. PRX-T<sub>33</sub> stimola chimicamente la pelle, determinando un effetto sinergico con risultati di gran lunga superiori rispetto ai due trattamenti eseguiti separatamente. Inoltre, PRX-T<sub>33</sub> idrata la pelle e l'edema che induce riduce il dolore da iniezione.

### METODO DI APPLICAZIONE

Facoltativo: applicare una crema anestetica sulla zona da trattare prima di procedere con la mesoterapia. Attendere 15 minuti e rimuoverla con un tampone di cotone o garza.

1. Perforare il tappo della fiala PRX-T<sub>33</sub> con la punta della cannula o un ago 18G.
2. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
3. Separare i capelli sezione per sezione, come se si stesse applicando una tintura, e massaggiare il cuoio capelluto con PRX-T<sub>33</sub> fino a completo assorbimento. (ESOBIORIVITALIZZAZIONE)
4. Iniettare il pool di mesoterapia nella stessa area attraverso piccoli ponfi intradermici (ENDOBIORIVITALIZZAZIONE).
5. Armonizzare tutte le sostanze presenti sul cuoio capelluto con un leggero massaggio e lasciare riposare il paziente 15 minuti.
6. Risciacquare il cuoio capelluto con un batuffolo di cotone imbevuto d'acqua.

Quando si tratta il cuoio capelluto, assicurarsi che il paziente sia consapevole che potrebbe sperimentare una forte desquamazione, soprattutto dopo la prima applicazione. Questo è normale e fa parte del processo di rivitalizzazione.

### PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Pianificare sessioni di mesoterapia in associazione a PRX-T<sub>33</sub> con sessioni di PRX-T<sub>33</sub> da solo.

- Sessione 1: PRX-T<sub>33</sub> + pool di mesoterapia
- Sessione 2: PRX-T<sub>33</sub>
- Sessione 3: PRX-T<sub>33</sub> + pool di mesoterapia
- Sessione 4: PRX-T<sub>33</sub>
- Sessione 5: PRX-T<sub>33</sub> + pool di mesoterapia

## PRX-T<sub>33</sub> PER IL TRATTAMENTO DELL'ALOPECIA

### INDICAZIONE D'USO

Il PRP è un'opzione terapeutica per la caduta dei capelli, inclusa l'alopecia androgenetica, sia come monoterapia che come coadiuvante della terapia convenzionale del trapianto di capelli.

### VANTAGGI

Questo trattamento combinato consente di utilizzare meno sangue e di iniettare solo una volta. Inoltre, la stimolazione con PRX-T<sub>33</sub> è rapida, comporta poco o nessun disagio, né tempi di inattività per il paziente.


### RAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Le piastrine nel PRP si attivano quando vengono iniettate nel cuoio capelluto e rilasciano molteplici fattori di crescita, che possono favorire la crescita dei capelli.

Tuttavia, è stato dimostrato che:

1. il tasso di successo della procedura PRP dipende dal numero e dall'affinità dei recettori dei fibroblasti attivati
2. che questi (numero e affinità) aumentano significativamente se entrano in contatto con i fattori di crescita piastrinici due volte ad intervalli di 8 ore. (confronta TAB 1)

TAB.1

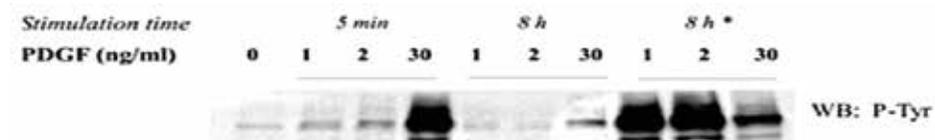

Understanding the specificity of receptor tyrosine kinases signaling  
De Donatis A., Cirri P. - Commun Integr Biol. 2008

L'esperienza clinica, curiosamente, ha dimostrato una migliore risposta di successo non solo con doppia iniezione di PRP ad un intervallo di 8 ore, ma anche dopo una stimolazione a-specifica eseguita con PRX-T<sub>33</sub>, 8 ore prima dell'iniezione di PRP.

Infine, l'esperienza clinica su 35 pazienti ha rilevato tra i soggetti pretrattati con **PRX-T<sub>33</sub>** un minor numero di non-responder e risultati amplificati rispetto ai soggetti non pretrattati. (TAB. 2)

TAB. 2



PRP nell'alopecia androgenetica: il pretrattamento con TCA-H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> può migliorare i risultati?  
 R.Castellana, A.Casadei -17° Congresso Internazionale di Medicina e Chirurgia Estetica SIES, Bologna  
 28/02/2014

## METODO DI APPLICAZIONE

1. Perforare il tappo della fiala **PRX-T<sub>33</sub>** con la punta della cannula o un ago 18G.
2. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
3. Separare i capelli sezione per sezione, come se si stesse applicando una tintura, e massaggiare il cuoio capelluto con **PRX-T<sub>33</sub>** fino a completo assorbimento. (Stimolazione 1)

**ATTENZIONE!** Quando si tratta il cuoio capelluto, assicurarsi che il paziente sia consapevole che potrebbe sperimentare una forte desquamazione, soprattutto dopo la prima applicazione. Questo è normale e fa parte del processo di rivitalizzazione.

4. Risciacquare il cuoio capelluto con un batuffolo di cotone imbevuto d'acqua.
5. Attendere 8 ore prima di iniettare il PRP. (Stimolazione 2). Si raccomanda di rispettare l'intervallo esatto di 8 ore in modo da massimizzare i risultati.

## RISULTATI PRIMA / DOPO

♂ 22 a. DA III A I STADIO (SCALA HAMILTON-NORWOOD)



Prima



Dopo

♀ 67 a. DA STADIO I-3 A I-2 (SCALA LUDWIG)



Prima



Dopo

### **LINEA DIRETTA**

con l'equipe scientifica  
per quesiti e reclami:  
[scientificdivision@wiqo.eu](mailto:scientificdivision@wiqo.eu)

### **WiQo S.p.A.**

Via Martinelli, 16  
34015, Muggia (Trieste)  
Italia  
Tel: +39 040 360408  
[info@wiqo.com](mailto:info@wiqo.com)  
[wiqo.com](http://wiqo.com)

 [@wiqo\\_official](https://www.instagram.com/wiqo_official)

**WiQO**<sup>®</sup>  
FORMULATORS OF SKIN CONFIDENCE