

WiQO^{med}

Wissenschaftliche Abteilung

Der direkte Kontakt zu Dermatologen und Forschungsbiologen von **WiQO^{med}** für wissenschaftliche Fragen oder Auskünfte zur ambulanten Patientenbehandlung

www.wiqomed.com
scientificdiv.gpq@wiqo.com



GPQ Srl - Mailand
Produktion und R&D
Tel.: +39 040 360408
Fax: +39 040 761393
contact@wiqomed.com
Via Flavia, 23/1
TRIEST - ITALIEN



Suisse MediCare

Verteiler exklusiv für die Schweiz
Corso Elvezia 23
6900 Lugano (Schweiz)
email: customer@suissemedicare.ch
t. +41 76 402 18 87
web: www.suissemedicare.ch

REVERSE BEAEBZE PEEL

PROTOKOLL FÜR DEN GEBRAUCH DES MEDIZINPRODUKTS



INFOMATERIAL FÜR MEDIZINISCHES FACHPERSONAL

WiQO^{med}

ANZEIGEN

Behandlung von **Melasma** und **Hyperpigmentierung der Haut**.

HÄUFIGKEIT DER ANWENDUNG

Alle 7 bis 30 Tage, nach Ermessen des Arztes. Mit mindestens 3 Sitzungen pro Woche beginnen, dann die Abstände je nach Melasma-Intensität und Verbesserung vergrößern.

GEGENANZEIGEN

- Gereizte Haut
- Reizbare Haut
- Seborrhoisches Ekzem
- Atopisches Ekzem
- Schwangerschaft und Stillzeit
- Hautausschläge und/oder Herpes

GEBRAUCH UND ANWENDUNGSMETHODE

Nachstehende Anweisungen von links nach rechts befolgen:

| RsP 1 | RsP 2 | Neutraliser | RsP 3 | Neutraliser | NACH DER BEHANDLUNG | BEHANDLUNG FÜR ZUHAUSE |
|--|--|---|--|---|--|--|
| <p>Den zu behandelnden Bereich mit P Solution reinigen. Großzügig auf alle betroffenen Stellen auftragen und mit Nitrilhandschuhen einmassieren, bis das Produkt eingezogen ist.</p> <p>Die Anwendung wiederholen.</p> <p>Nach dem vollständigen Einziehen den Bereich mit einem feuchten Pad reinigen.</p> <p>Gut trocknen.</p> | <p>Mit den Nitrilhandschuhen nur auf pigmentierten Stellen oberflächlich auftragen, nicht einmassieren.</p> <p>3 Minuten* einwirken lassen.</p> <p>Falls der Patient ein Brennen oder Rötungen auftreten, unverzüglich neutralisieren (Neutraliser).</p> | <p>Vor dem Gebrauch schütteln. Produkt auftragen. Die Neutralisierung erfolgt in wenigen Sekunden.</p> <p>Empfindet der Patient ein Brennen, ruhen lassen, bis das Brennen nachlässt.</p> <p>Mit einem angefeuchteten Pad entfernen.</p> <p>Gut trocknen.</p> | <p>Mit den Nitrilhandschuhen nur auf pigmentierten Stellen oberflächlich auftragen, nicht einmassieren.</p> <p>3 Minuten* einwirken lassen.</p> <p>Falls der Patient ein Brennen von mehr als 5/10 empfindet oder Rötungen auftreten, unverzüglich neutralisieren (Neutraliser).</p> | <p>Vor dem Gebrauch schütteln. Produkt auftragen. Die Neutralisierung erfolgt in wenigen Sekunden.</p> <p>Empfindet der Patient ein Brennen, ruhen lassen, bis das Brennen nachlässt.</p> <p>Mit einem angefeuchteten Pad entfernen.</p> <p>Gut trocknen.</p> | <p>WiQo REVERSE SERUM auftragen und sanft einmassieren, bis es eingezogen ist.</p> <p>WiQo ICP CREAM oder eine andere Sonnenschutzcreme auftragen (LSF 50+).</p> | <p>WiQo REVERSE SERUM zweimal täglich anwenden, solange die Flecken erkennbar sind, dann zur Beibehaltung und Vorbeugung einmal täglich morgens.</p> <p>Umfassender Lichtschutz mit WiQo ICP CREAM oder einer anderen Sonnenschutzcreme (LSF 50+).</p> |

* Bei sehr dicker Haut kann man RsP 2 und RsP 3 bis zu 15 Minuten lang einwirken lassen.

WARNHINWEISE

- Anwendung nur durch Mediziner.
- Medizinprodukt zur Außenanwendung.
- **Besondere Vorsicht bei Phase 2 und Phase 3:**
 - Treten während der Anwendung Rötungen oder starkes Brennen auf, sofort den Neutraliser anwenden.
 - Phase 3 bei stark geröteter Haut oder anhaltendem Brennen nach der Neutralisierung von Phase 2 nicht anwenden.
 - Sofort neutralisieren, falls auf den behandelten Stellen hervorstehende Punkte oder kleine weiße Bereiche auftreten (Neutraliser).
- Bei anhaltendem Brennen oder starkem Hautausschlag nach der Anwendung des Neutraliser und nach dem Abwaschen der Haut eine Steroidcreme auftragen.
- Keine Latexhandschuhe verwenden, sie können Allergien verursachen. Die Verwendung von Nitrilhandschuhen wird empfohlen.
- Nach Rasur oder Wachsen ausreichend Zeit vergehen lassen.
- Augenkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt mit Salzlösung gründlich ausspülen, die Lösung stets griffbereit halten.
- Kontakt mit den Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit den Schleimhäuten sofort den Neutraliser auftragen und mit einem feuchten Pad entfernen.
- Das Produkt ist korrosiv.