

M1US0MM3SMC_FR_V1_09/2019

Copyright © 2018 - GPQ srl

Matériel d'information réservé aux professionnels de la santé. Reproduction interdite.

WiQO^{med}
Division scientifique

Une ligne directe pour contacter les dermatologues et biologistes de recherche de **WiQO^{med}** pour toute question scientifique ou enquête concernant le traitement ambulatoire

www.wiqomed.com
scientificdiv.gpq@wiqo.com



GPQ Srl - Milan
Laboratoire de production et R&D
Tél. : +39 040 360408
Fax : +39 040 761393
contact@wiqomed.com
Via Flavia, 23/1
TRIESTE - ITALIE



Suisse MediCare

Distributeur exclusif pour la Suisse
Corso Elvezia 23
6900 Lugano (Suisse)
email: customer@suissemedicare.ch
t. +41 76 402 18 87
web: www.suissemedicare.ch

REVERSE BEAEBZE PEEL

PROTOCOLE D'UTILISATION DU DISPOSITIF MÉDICAL



MATÉRIEL D'INFORMATION RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ.

WiQO^{med}

Reproduction interdite.

INDICATIONS

Traitement du **mélasma** et de l'**hyperpigmentation de la peau**.

FRÉQUENCE D'UTILISATION

Tous les 7 à 30 jours, selon les indications du médecin. Commencer par au moins 3 séances hebdomadaires, puis réduire la fréquence en fonction de l'intensité du mélasma et de son amélioration.

MÉTHODE D'UTILISATION ET APPLICATION

Suivre les instructions ci-dessous, de gauche à droite :

RsP 1	RsP 2	Neutraliser	RsP 3	Neutraliser	POST-TRAITEMENT	TRAITEMENT À DOMICILE
Nettoyer la zone à traiter avec la P solution. Appliquer généreusement sur toutes les zones touchées et masser délicatement avec des gants en nitrile jusqu'à absorption. Répéter l'application une seconde fois. Une fois complètement absorbé, laver la zone avec un tampon imbibé. Bien sécher.	Appliquer superficiellement avec les gants en nitrile sur les zones pigmentées uniquement, sans masser. Laisser poser pendant 3 minutes.* Si le patient signale une sensation de brûlure supérieure à 5/10 ou si des rougeurs apparaissent, appliquer le Neutraliser immédiatement.	Agiter avant l'utilisation. Appliquer le produit. La neutralisation ne prend que quelques secondes. Si le patient a signalé une brûlure, le laisser reposer jusqu'à ce que la brûlure diminue. Éliminer avec un tampon imbibé d'eau. Bien sécher.	Appliquer superficiellement avec les gants en nitrile sur les zones pigmentées uniquement, sans masser. Laisser poser pendant 3 minutes.* Si le patient signale une sensation de brûlure supérieure à 5/10 ou si des rougeurs apparaissent, appliquer le neutralisant immédiatement (Neutraliser).	Agiter avant l'utilisation. Appliquer le produit. La neutralisation ne prend que quelques secondes. Si le patient a signalé une brûlure, le laisser reposer jusqu'à ce que la brûlure diminue. Éliminer avec un tampon imbibé d'eau. Bien sécher.	Appliquer le WiQo REVERSE SERUM en massant délicatement jusqu'à absorption. Appliquer la WiQo ICP CREAM ou une autre crème de protection solaire (SPF 50+).	WiQo REVERSE SERUM doit être utilisé deux fois par jour tant que les taches sont présentes et une fois par jour le matin dans le cadre de l'entretien et de la prévention. Photoprotection complète avec WiQo ICP CREAM ou autre crème de protection solaire (SPF 50+).

* RsP 2 et RsP 3 peuvent rester en pose pendant 15 minutes en cas de peau très épaisse.

AVERTISSEMENTS

- Réservé aux médecins uniquement.
- Dispositif médical à usage externe.
- **L'application de la Phase 2 et de la Phase 3 doit être effectuée avec soin :**
 - Si des rougeurs ou des brûlures graves se produisent pendant l'application, appliquer le neutralisant immédiatement (Neutraliser).
 - Ne pas appliquer la Phase 3 si la peau est très rougie ou si le patient a signalé des brûlures persistantes après la neutralisation de la Phase 2.
 - Si des taches ou de petites zones blanc cassé apparaissent sur les zones traitées, neutraliser immédiatement.
- Si la brûlure ou une éruption cutanée intense persistent après l'utilisation du Neutralisant avec rinçage successif de la peau, appliquer une crème à base de stéroïde.
- Ne pas utiliser de gants en latex car ils pourraient provoquer des allergies. Il est recommandé d'utiliser des gants en nitrile.
- Traiter en respectant un délai raisonnable après le rasage ou l'épilation à la cire.
- Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec une solution saline, à garder toujours à portée de main.
- Éviter le contact avec les muqueuses. En cas de contact avec les muqueuses, appliquer immédiatement le Neutraliser puis l'éliminer avec un tampon imbibé.
- Le produit est corrosif.